

仕様

販売名	ライトテック-5B		
医療機器認証番号	304AHBZX00040000	電源	定格 AC100V 50/60Hz
分類	管理医療機器・特定保守管理医療機器	電源入力	410VA
流量設定	0.25、0.5、0.75、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 L/分	電撃保護	クラスⅡ機器、B形装着部
酸素濃度	全設定流量90%（-3%/+6%）	EMC	JIS T 0601-1-2：2018に適合
消費電力	1L/分 80W、3L/分 115W、5L/分 185W	警報機能	電源確認、濃度低下、チューブ折れ、始動期間、異常（圧力、制御、流量、コンプレッサ、高温、火災検知）
運転音	1L/分 26dB(A)、3L/分 30dB(A)、5L/分 32dB(A) ※無響室：正面1m、高さ30cmにおいて	使用条件	周囲温度 5～35℃ 相対湿度 30～75%（結露のないこと） 気圧範囲 900～1,060hPa（標高約1,000mまで）
質量	19kg	JANコード	4906938984343
寸法	高さ62cm×幅30cm×奥行32cm	■従来の加湿器タイプが良い場合はオプション対応（別売）が可能です。	



2022年度グッドデザイン賞を受賞しました。
家庭から病院まで幅広いニーズに対応し、
必要とする人々に健康的な生活をもたらす、
社会的意義が評価されました。

暮らしに寄り添う酸素濃縮装置。

KM13

Manufactured by



公益財団法人 日本デザイン振興会
2022年度 グッドデザイン賞受賞
（医療用機器・設備部門）



●製品の色は印刷物の為実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。●画像は一部合成です。

【 発 売 元 】
株 式 会 社 小 池 メ デ ィ カ ル
〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-8
TEL:03(5662)6605
www.koike-medical.co.jp



■お問い合わせは…

【 製造販売元 】
ダイキン工業株式会社 特 機 事 業 部
〒566-8585 大阪府摂津市西一津屋1番1号

2023.4

保険適用

安心、使いやすさを追い求め患者さまのために KM13

安心

停電時や万一の機器故障時も 酸素供給を継続

ポンベ自動切替機能(オプション品で対応が可能に)

- 停電時や機器故障時*に自動的にポンベに切替えて酸素を供給し続けます。
また、ポンベの残圧が低くなった場合は、音声でお知らせします。
※一部の故障モードを除く。




●おおよそのポンベからの酸素供給時間

ポンベ サイズ	充てん圧	設定流量(L/分)				
		1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
2.0 L	19.6 MPa	300分	150分	100分	70分	60分

火災時は自動で酸素供給を停止

火災検知機能

- 機器に火が入る前に、素早く酸素の供給を停止します。

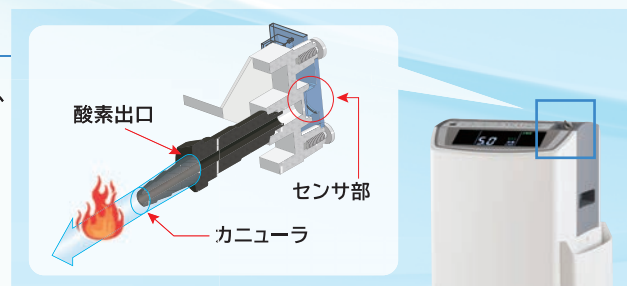

誤操作防止 流量の上限設定が可能

最大流量制限機能

- 処方流量以上の酸素吸入防止が可能に。
0.25～5.0L/分の範囲内(14段階)で設定が可能です。


長時間の使用も安心・快適な省エネ&静音設計

- コンプレッサの高効率化・静音化の技術により消費電力と運転音を抑制していますので、長期の療養時にも安心して快適にご使用いただけます。

加湿

給水の手間をかけずにうるおい加湿

- 給水無しでも酸素が加湿されます。
水分透過膜が空気中の水蒸気を取り込み、患者様へうるおいのある酸素を供給。

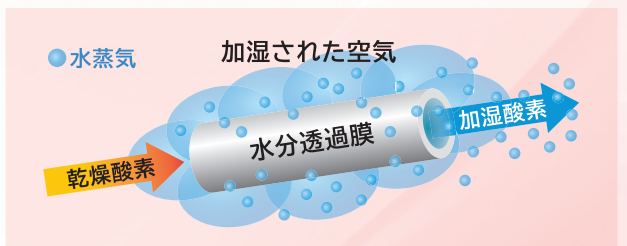

小型
軽量

移動・設置が簡単な軽量モデル

- 設置が容易な19kgに、軽量化を実現しました。

置き場所を選ばない省スペース

- 従来モデルから約19%の省スペース化を実現しました。




簡単

簡単操作、 わかりやすい表示・音声ガイダンス

- シンプルでわかりやすいボタン操作。
- アラーム内容がすぐわかる表示。
- 操作内容や各種警報を音声ガイダンスでわかりやすく通知します。

ボタン一押しで あらかじめ設定した 処方に変更可能

- 安静時、労作時、就寝時の処方流量をあらかじめ設定することが可能です。

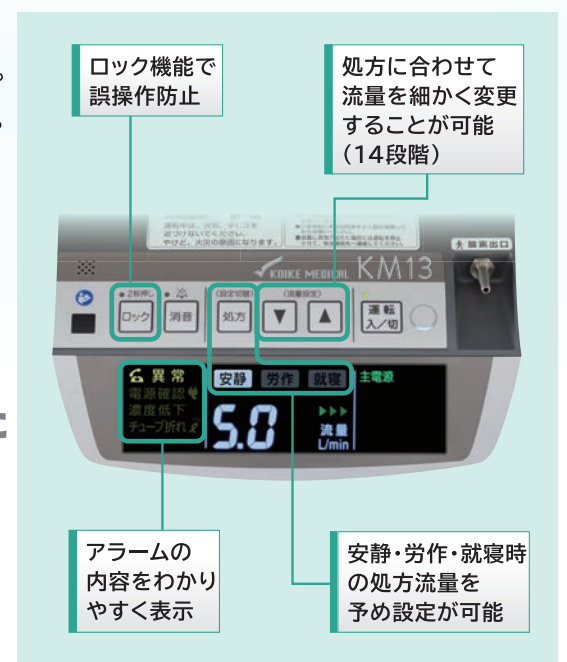

※写真、イラストはイメージです。